


3D PRINT

Ponad 80% dzieci i osób dorosłych boryka się z wadami stóp i postawy.

Stopy to **fundament** naszego ciała
zadbaj o nie już dziś!

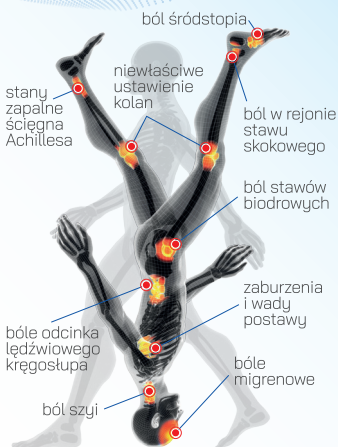

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WKŁADEK INDYWIDUALNYCH DRUKOWANYCH 3D

Wkładki indywidualne 3D - dopasowane do Twoich stóp



Pamiętaj: wkładki indywidualne są elementem terapii i powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją oraz zaleceniami lekarza lub innego specjalisty.

Na dobór wkładek wpływają m.in:



wyniki badania



indywidualne potrzeby użytkownika



rodzaj aktywności



typ obuwia



wiek



masa ciała

1 Najważniejsze cechy wkładek drukowanych 3D



Precyzyjne dopasowanie



Lekka i stabilna konstrukcja



Kontrolowane strefy wsparcia



Możliwość personalizacji

2 Zasada użytkowania

Na początku użytkowania może pojawić się lekkie uczucie zmiany podparcia, napięcia mięśniowego lub zmęczenia. Objawy te powinny stopniowo ustępować. Silny ból, otarcia, drętwienie lub narastający dyskomfort wymagają przerwania użytkowania i kontaktu ze specjalistą.

Okres adaptacji:

1 - 2 dzień

🕒 1-4 godziny dziennie

po 3 dniach

🕒 użytkować zgodnie z zaleceniami specjalisty

3 Pielęgnacja



Czyścić wilgotną ściereczką lub miękką gąbką.



Suszyć w temperaturze pokojowej.



Po zdjęciu obuwia wyjąć wkładki, aby mogły odparować wilgoć.



Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.



Chronić przed wysoką temperaturą i działaniem słońca.

Przechowywanie



Prać w pralce.



Suszyć na kaloryferze, na słońcu, suszarką.



Zanurzać w gorącej wodzie.



Stosować agresywnych detergentów.



Wkładać mokrych wkładek do obuwia.

Nie należy

4 Konstrukcja wkładki indywidualnej drukowanej 3D



Ostateczna budowa wkładki zależy od wyniku badania, projektu oraz zaleceń specjalisty.

5 Kiedy zgłosić się do specjalisty?

- ✓ w terminie wyznaczonej kontroli,
- ✓ gdy wkładka przesuwa się w bucie,
- ✓ po znaczącej zmianie masy ciała,
- ✓ u dzieci - gdy stopa urośnie lub wkładka przestanie pasować do obuwia.
- ✓ widoczne pęknięcia, odkształcenie lub uszkodzenie wkładki.
- ✓ gdy pojawi się ból, otarcie, ucisk lub drętwienie,
- ✓ po zmianie obuwia używanego na co dzień,
- ✓ po urazie, operacji lub zmianie sposobu chodzenia,
- ✓ pogorszenie komfortu chodzenia,

Po kontroli może okazać się, że zaistnieje potrzeba wymiany wkładek na nowe, aby dostawać je do aktualnych warunków i potrzeb pacjenta.

6 Gwarancja i trwałość

Gwarancja wynosi **12 miesięcy** i obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających m.in. z:

- nieprawidłowego użytkowania,
- samodzielnych przeróbek,
- stosowania w nieodpowiednim obuwiu,
- ekspozycji na wysoką temperaturę,
- czyszczenia niezgodnego z instrukcją,
- naturalnego zużycia podczas eksploatacji.

Wkładki należy wymieniać zgodnie z zaleceniami specjalisty lub gdy utracą swoje właściwości, ulegną zużyciu albo przestaną pasować.

7 Kontrola

W przypadku pytań dotyczących użytkowania, dopasowania lub pielęgnacji wkładek skontaktuj się z punktem, w którym zostały wykonane, lub ze specjalistą prowadzącym.

Termin kontroli:

Model / numer wkładki:

Specjalista:

Kontakt:



ZBIGNIEW FRĄCKOWIAK MAZBIT PRZEDSIĘBIORSTWO
ul. R. Szlafroka 18, PL 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax.: (+48) 61 285 13 07, kom.: (+48) 530 458 977
e-mail: biuro@mazbit.pl

Chodź zdrowiej - krok po kroku.



Instrukcja używania
dostępna na
mazbit.pl/instrukcja

