

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE – SERIA PROFILACTIC

Zatrzymaj rozwój schorzeń i zadбай o zdrowie stóp już teraz!

Firma **Mazbit** oferuje szeroką gamę wkładek ortopedycznych z linii: Comfort, Profilactic, Protection, iOrto Medic, iOrto Individual oraz iOrto Professional. W zależności od potrzeb, wieku pacjenta, rodzaju obuwia i aktywności fizycznej, wkładki z serii **Profilactic** wspierają profilaktykę oraz zapewniają komfort, redukując ryzyko przeciężenia stóp.

Więcej informacji o produktach firmy Mazbit można uzyskać na stronie www.mazbit.pl oraz w najbliższym punkcie sprzedaży.

Jeśli masz uwagi na temat naszych produktów lub chcesz podzielić się opinią, zapraszamy do wypełnienia ankiety <https://www.mazbit.pl/podziel-sie-opinia/>

Dzięki Waszym opiniom stale udoskonalamy nasze produkty, by spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

SPIS TREŚCI:

1. W jakim celu stosuje się wkładki ortopedyczne z serii Profilactic?
2. Modele wkładek z serii Profilactic wspierające zdrowie stóp.
3. Kiedy warto zadbać o profilaktykę stóp?
4. Jak stosować wkładki Profilactic?
5. Przeciwwskazania.
6. Zasady użytkowania wkładek.

1. W jakim celu stosuje się wkładki ortopedyczne z serii Profilactic?

Wkładki z serii **Profilactic** są przeznaczone do profilaktyki oraz wsparcia stóp, aby:

- zmniejszyć codzienne obciążenie stóp,
- poprawić komfort chodzenia,
- zapobiec pogłębieniu się drobnych deformacji,
- odciążać wrażliwe miejsca stopy, redukując ryzyko bólu.

2. Modele wkładek z serii Profilactic wspierające zdrowie stóp:

- **Płaskostopie podłużne:** Perfect, Perfect Plus, Perfect Lux, Carlo, Optima, Filippe, Navette 2/3, Marc Gel, Sport Support, Balnce, Klin Med, Klin Med Lux, Mario Kid, Matteo Kid 2/3, Filippe Kid, Insoles Kid
- **Płaskostopie poprzeczne:** Perfect, Perfect Plus, Perfect Lux, Optima, Luna, Venus, Twist3/4, Navette2/3, Princess2/3, Elba, K-Med, U-Med, T-Med
- **Stopa płasko – koślawa:** Perfect, Perfect Plus, Perfect Lux, Sup Med 5, 10 mm, Matteo 2/3, Mario Kid, Matteo Kid 2/3, Sup Kid 5,10 mm, Insoles Kid, Kid Support
- **Haluksy:** Luna, Venus, Princess 2/3, Sport Support,

- **Odciążenie pięty:** Carlo, Sport Support, Balance, Memo Ostrog, Memo Ostrog Lux,
 - **Koślawość:** Sup Med. 5,10 mm, Matteo 2/3, Korektus Lat 5, 10 mm, Mario Kid, Matteo Kid 2/3, Sup Kid 5,10 mm
 - **Szpotawość:** Pro Med 5, 10 mm, Korektus Lat 5,10 mm,
 - **Odciążenie stóp i komfort codzienny:** Travel, Atomic, Comfort Gel, Ballance, Energy gel, Sport Support, Memory, Dynamic Gel, Merc Gel,
-

3. Kiedy warto zadbać o profilaktykę stóp?

- Odczuwasz zmęczenie lub ból stóp po całym dniu pracy.
 - Pracujesz w pozycji stojącej lub intensywnie obciążasz stopy.
 - W Twojej rodzinie występowały problemy ze stopami (haluksy, płaskostopie).
 - Na stopach pojawiają się modzele, odciski lub zgrubienia.
 - Często nosisz obuwie na wysokim obcasie lub ciasne buty.
-

4. Jak stosować wkładki Profilactic?

- Wkładki pełne umieszczaj w obuwiu o odpowiedniej szerokości.
 - W przypadku wkładek 2/3 lub 3/4 można je wkleić i stosować również w butach z odkrytymi palcami.
 - Dobór wkładek powinien uwzględniać rodzaj obuwia oraz potrzeby stóp.
-

5. Przeciwwskazania:

- Zaawansowane deformacje stóp wymagające wkładek indywidualnych.
 - Rany i owrzodzenia na podszwach stóp.
 - Rozwinięty zespół stopy cukrzycowej.
-

6. Zasady użytkowania:

- Umieszczaj wkładki zgodnie z oznaczeniem (prawa/lewa stopa).
- Pozostaw obuwie rozsznurowane po zdjęciu, aby wkładki mogły wyschnąć.
- Czyść wkładki wilgotną szmatką z dodatkiem szarego mydła.
- Nie pierz wkładek w pralce i unikaj agresywnych środków czyszczących.
- Susz wkładki w przewiewnym miejscu, unikając wysokich temperatur.
- Przed zastosowaniem skonsultuj się ze specjalistą.

Dzięki wkładkom Profilactic zadbasz o zdrowie stóp i komfort każdego kroku!

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mazbit.pl.