

ŻELOWE PRODUKTY OSŁONOWE – LINIA PROTECTION

Zatrzymaj rozwój schorzeń i zadбай o zdrowie stóp już teraz!

Firma **Mazbit** oferuje szeroką gamę wkładek ortopedycznych z linii: Comfort, Profilactic, Protection, iOrto Medic, iOrto Individual oraz iOrto Professional. W zależności od potrzeb, wieku pacjenta, rodzaju obuwia i aktywności fizycznej, produkty z serii **Protection** wspierają profilaktykę oraz zapewniają komfort, redukując ryzyko otarć i powstawania hiperkeratoz.

Więcej informacji o produktach firmy Mazbit można uzyskać na stronie www.mazbit.pl oraz w najbliższym punkcie sprzedaży.

Jeśli masz uwagi na temat naszych produktów lub chcesz podzielić się opinią, zapraszamy do wypełnienia ankiety <https://www.mazbit.pl/podziel-sie-opinia/>

Dzięki Waszym opiniom stale udoskonalamy nasze produkty, by spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Spis treści:

1. W jakim celu stosuje się produkty z linii Protection?
2. Modele produktów linii Protection wspierające zdrowie stóp.
3. Kiedy warto stosować produkty Protection?
4. Jak stosować produkty Protection?
5. Przeciwwskazania.
6. Zasady użytkowania produktów.

1. W jakim celu stosuje się produkty z linii Protection?

Produkty te są przeznaczone do ochrony stóp, aby:

- zapobiegać otarciom i podrażnieniom skóry,
- zmniejszać nacisk na wrażliwe miejsca,
- poprawiać komfort chodzenia,
- chronić stopy po zabiegach podologicznych,
- korygować drobne deformacje palców i zapobiegać ich pogłębieniu.

2. Modele produktów linii Protection wspierające zdrowie stóp:

- **Płaskostopie poprzeczne:** Step Gel
- **Haluks:** Corrector Pro, Hallux Remedium, Haluks Duo, Haluks Gel, Prohaluks Duo, Separator Duo, Proseparator Duo, Prohaluks Pad, Klin Gel, Prohaluks Sil, Haluks Cober, Hallugym,

- **Ostroga Piętowa:** Simon Sil
 - **Metatarsalgia:** Salma Gel Lux, Promedic Gel, Metatarsal Cover, Metatarsal Protector
 - **Modzele i Nagiotki:** Salma Gel Lux, Salma Gel, Promedic Gel, Metatarsal Cover
 - **Palce młotkowate:** Hammer Gel, Hammer Gel Lux, Separator Duo Mini
 - **Nachodzenie palców na siebie:** Separator Lux, Prohaluks Pad
 - **Odciski i otarcia:** Toe Tube, Tube Gel, Virtus Sil, Plast Med, Metatarsal Protector, Space Gel, Heel Protector
 - **Przeciążenia ścięgna Achillesa:** Simon Gel
 - **Kostka krawca:** Protect Gel
-

3. Kiedy warto stosować produkty Protection?

- **Profilaktyka otarć i podrażnień:**
Jeśli nosisz ciasne obuwie, buty na obcasie lub intensywnie obciążasz stopy podczas chodzenia.
 - **Ochrona po zabiegach:**
W celu przyspieszenia regeneracji skóry i zapobiegania bólowi.
 - **Wsparcie terapii ortopedycznej:**
Jako uzupełnienie wkładek ortopedycznych, w szczególności linii **iORTO**.
 - **Codzienny komfort:**
Dla osób aktywnych fizycznie, które chcą uniknąć urazów i otarć.
-

4. Jak stosować produkty Protection?

- Upewnij się, że skóra stóp jest czysta i sucha przed założeniem produktu.
 - Delikatnie załóż produkt zgodnie z jego przeznaczeniem (np. na haluksa, między palce).
 - Półwkładki wklej w odpowiednie miejsce w bucie.
 - Gumę do ćwiczeń załóż na paluchy i rozciągaj ćwicząc.
 - W przypadku produktów wielokrotnego użytku, po każdym użyciu umyj je letnią wodą z delikatnym mydłem i dokładnie osusz.
 - Produkty powinny być stosowane w dobrze dopasowanym obuwiu, aby uniknąć przesuwania się podczas chodzenia.
 - Przed zastosowaniem skonsultuj się ze specjalistą.
-

5. Przeciwwskazania:

- **Rany otwarte lub stany zapalne skóry:**
Nie używaj produktów bez konsultacji z lekarzem.
 - **Zaawansowane deformacje stóp:**
W takich przypadkach produkty mogą być niewystarczające i należy rozważyć indywidualne rozwiązania ortopedyczne.
 - **Alergia na użyte materiały:**
W przypadku reakcji alergicznych przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
-

6. Zasady użytkowania produktów:

- **Higiena:**
Czyść produkty po każdym użyciu zgodnie z instrukcją.
 - **Unikaj wysokich temperatur:**
Nie susz produktów na grzejnikach ani w bezpośrednim słońcu.
 - **Przechowuj w suchym miejscu:**
Produkty powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu.
 - **Regularna kontrola:**
Wymieniaj produkty na nowe, gdy zauważysz oznaki zużycia lub utratę właściwości ochronnych.
-

Dzięki produktom z linii **Protection** zadbasz o zdrowie i komfort swoich stóp na co dzień. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mazbit.pl.